

### Instruções de Uso Kit Cânula Blockaid

#### Apresentação Comercial

AEQR21090/AETR22050 - Kit Cânula  
BlockAID 21GX90mm/22GX50mm;

AEQR21150/AETR21100 - Kit Cânula  
BlockAID 21GX150mm/21GX100mm;

AETR18090/AETR18150 - Kit Cânula  
BlockAID 18GX90mm/18GX150mm;

AEQR24025/AEQR24035 - Kit Cânula  
BlockAID 24GX25mm/24GX35mm

#### Indicações de Uso

O Kit Cânula BlockAID está indicado nos procedimentos minimamente invasivos de bloqueio analgésico e anestésico de nervos e gânglios para tratamento da dor crônica e aguda, com auxílio de ultrassom e estimulação.

#### Princípio de Funcionamento

O kit Cânula BlockAID propicia conforto ao paciente e ao cirurgião, pois possui eletroestimulação acoplada à cânula e revestimento exclusivo Nanoclear e com cobertura de silicone, o que facilita a entrada da cânula refletindo todo o corpo da cânula quando vista ao Ultrassom, dando segurança ao procedimento. Quando necessário, o cirurgião poderá retirar o cateter da cânula conectando a seringa diretamente ao Hub facilitando a infiltração do fármaco em locais onde a musculatura se mostra menos densa.

#### Utilização do Produto

- Abra a embalagem estéril para retirada do produto. Faça uma inspeção para verificar a integridade da embalagem;
- Verificar se o comprimento e o diâmetro da agulha correspondem ao indicado no rótulo;
- Conectar a seringa ao cateter de silicone ou diretamente ao Hub da cânula;
- Inserir o conector elétrico da cânula ao equipamento gerador de estímulos para localização e estimulação do nervo;
- Inserir a agulha e determinar a distância do nervo através do Ultrassom e da estimulação conforme métodos específicos;
- Identificar a(s) ponta(s) da(s) agulha(s) em relação ao nervo e prosseguir com a injeção da substância anestésica e/ou analgésica;
- Retirar a(s) agulha(s) e descartar todo o sistema em local apropriado, respeitando as normas vigentes de descarte de material sólido estabelecido pelo hospital.

#### Precauções

- Não utilize o produto caso a embalagem esteja danificada;
- O fabricante recomenda USO ÚNICO do produto;
- Não utilize este produto caso o prazo de validade esteja expirado.

#### Condições de Armazenamento

- As seguintes condições de armazenamento devem ser observadas:
- Armazenar entre temperatura inferior a 50°C;
  - Umidade relativa para armazenamento inferior ou igual a 80%;
  - Não colocar objetos pesados sobre a embalagem;
  - Evitar bater a embalagem ou amassar.

#### Prazo de Validade

Vide rotulagem em embalagem externa.

#### Importado e Distribuído no Brasil

INNOVA Tecnologia para Saúde Ltda  
me. Avenida Presidente Kennedy, 3500  
– Santa Paula – São Caetano do Sul –  
SP  
**Resp. Técnico: Emerson Lima CRF/SP  
29.947**

**Reg. ANVISA: 81512920001**

#### Fabricado por:

MDL SRL.  
Via Tavani, 1/A –  
23014 Delebio (SO) –  
Itália

STERILE EO

