

## Instruções de Uso

### Kit Cânula Duo Disk

#### Instruções de Uso

1 – Antes de abrir a embalagem, certifique-se de que não existem danos capazes de prejudicar a esterilização;

2 – Desconectar a cânula da manopla lentamente e com cuidado;

3 – Irrigar a cânula introdutora com soro fisiológico estéril;

4 – Utilizar o posicionador cirúrgico (que se encontra no interior do kit) no dorso do paciente para marcação do ponto de entrada da cânula de discografia e também da cânula de trabalho;

5 – Utilizando uma técnica de discografia padrão, introduza a cânula pósterio-lateralmente para o interior do disco intervertebral. Utilize o posicionador cirúrgico com diversas marcações para facilitar a punção;

Obs.: Não retire o estilete da cânula antes de confirmar radiologicamente o posicionamento no disco;


6 – Depois de confirmar a posição da cânula no disco intervertebral, desconecte o estilete da cânula e retire-o;

Obs.: O médico poderá injetar contraste não-iônico e antibióticos no intuito de visualizar os limites do núcleo pulposo. Dessa forma, o médico poderá delimitar o espaço correto para a dissectomia;

7 – Introduza lentamente o mandril helicoidal da peça de mão à cânula puncionada e conecte o eixo da cânula ao eixo da manopla cuidadosamente;

8 – O médico deverá certificar-se que pelo menos uma volta do mandril helicoidal está exposto na ponta da cânula e localizado bem ao centro do disco;

9 – Aperte o botão que rotaciona o mandril e faça movimentos lentos, e de aproximadamente 1cm para frente e para trás, desloque a cânula 30º para a esquerda e depois para a direita, repetindo os movimentos lentos para frente e para trás como no ponto inicial.

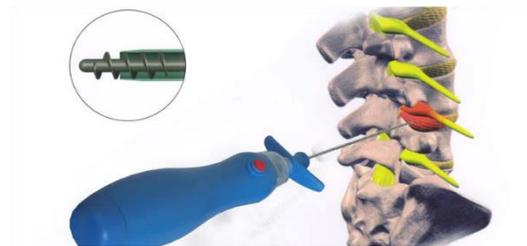

O procedimento levará de 5 a 15 minutos para ser realizado;

10 – Após o término do procedimento, desconecte a manopla da cânula retirando o mandril helicoidal da mesma;

11 – Retire a cânula cuidadosamente e coloque curativos estéreis no local da introdução.

#### Indicações de Uso

O kit cânula Duo Disk destina-se ao tratamento cirúrgico das hérnias de disco lombares, torácicas e cervicais, através da retirada de material do núcleo pulposo do disco intervertebral durante a dissectomia percutânea mecânica.

#### Contra-indicações

É contra-indicado a realização do procedimento em pacientes com fratura na coluna de origem traumática, pacientes grávidas, pacientes portadores de tumores, pacientes com infecções sistêmicas ou no sítio cirúrgico.

#### Descarte do Material

O descarte de material perfurocortante, deverá respeitar as normas sanitárias vigentes, e o sistema de descarte de resíduos sólidos estabelecidos pelo hospital.

#### Fabricante:

**Dragon Crown Medical Co., Ltd**  
**Shandong Province – China**

#### Importado e Distribuído por:

**INNOVA Tecnologia para Saúde Ltda me**  
**Avenida Presidente Kennedy, 3500 – Sl. 304**  
**CEP: 09572-200 – São Caetano do Sul – SP**  
**Resp. Técnico: Emerson Lima – CRF/SP: 29.947.**