

Instruções de Uso

Kit Cânula Stimy

Apresentação Comercial

AETM 22050 – Kit Cânula Stimy 22GX50mm

AETM 21090 – Kit Cânula Stimy 21GX90mm

AETM 21120 - Kit Cânula Stimy 21GX120mm

AETM 21150 - Kit Cânula Stimy 21GX150mm

AETM 18100 - Kit Cânula Stimy 18GX100mm

AETM 18120 - Kit Cânula Stimy 18GX120mm

AETM 18150 - Kit Cânula Stimy 18GX150mm

Indicações de Uso

O Kit Cânula Stimy está indicado nos procedimentos minimamente invasivos de viscosuplementação articular e bloqueio doloroso de nervos e gânglios com auxílio de ultrassom e estimulação.

Princípio de Funcionamento

O kit Cânula Stimy propicia conforto ao paciente e ao cirurgião, pois possui eletroestimulação acoplada à cânula e revestimento exclusivo Nanoclear e com cobertura de silicone, o que facilita a entrada da cânula sem causar danos ao tecido, refletindo todo o corpo da cânula quando vista ao Ultrassom, dando segurança ao procedimento.

Utilização do Produto

- Abra a embalagem estéril para retirada do produto. Faça uma inspeção para verificar a integridade da embalagem;
 - Verificar se o comprimento e o diâmetro da agulha correspondem ao indicado no rótulo;
 - Conectar o adaptador multiportas às terminações luer-lock do cateter da cânula quando necessária a infiltração simultânea do fármaco;
 - Inserir o conector elétrico da cânula ao equipamento gerador de estímulos para localização e estimulação do nervo;
 - Inserir a seringa dose-control ao adaptador multiportas através do conector luer-lock;
 - Inserir a agulha e determinar a distância do nervo através do Ultrassom e da estimulação conforme métodos específicos;
- Identificar a(s) ponta(s) da(s) agulha(s) em relação ao nervo e prosseguir com a injeção da substância anestésica e/ou analgésica;

- Retirar a(s) agulha(s) e descartar todo o sistema em local apropriado, respeitando as normas vigentes de descarte de material sólido estabelecido pelo hospital.

Precauções

- Não utilize o produto caso a embalagem esteja danificada;
- O fabricante recomenda USO ÚNICO do produto;
- Não utilize este produto caso o prazo de validade esteja expirado.

Condições de Armazenamento

As seguintes condições de armazenamento devem ser observadas:

- Armazenar entre temperatura inferior a 50°C;
- Umidade relativa para armazenamento inferior ou igual a 80%;
- Não colocar objetos pesados sobre a embalagem;
- Evitar bater a embalagem ou amassar.

Prazo de Validade

Vide rotulagem em embalagem externa.

Importado e Distribuído no Brasil

INNOVA Tecnologia para Saúde Ltda me.
Avenida Presidente Kennedy, 3500 –
Santa Paula – São Caetano do Sul – SP
Resp. Técnico: Emerson Lima CRF/SP 29.947

Reg. ANVISA: 81512920003

Fabricado por:

MDL SRL.
Via Tavani, 1/A – 23014
Delebio (SO) – Itália

STERILE EO

